



АЛЕРГОДІАГНОСТИКА ЕКСПРЕС-ТЕСТИ БЕЗПРИЛАДНА ЕКСПРЕС ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ



КРОК 1



Внесіть 25 мкл цільної
крові або 20 мкл
сироватки в касету

КРОК 2



Відразу після цього
внесіть 2 краплі
необхідного розчину
ALFA алергену

КРОК 3



Результат аналізу
візуалізується через 15-
20 хвилин

ВСТУП

Німецька компанія Dr. Fooker пропонує:

Інноваційний проект ALFA Алерго експрес-тест у сфері діагностичної медицини лежить у руслі стратегії розвитку медичної галузі, він простий у застосуванні, може використовуватися на практиці дільничними лікарями та лікарями загальної терапії і навіть фельдшерами у клініко-діагностичних лабораторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах, що складають основний кістяк охорони здоров'я. ALFA експрес-тест - продукт останніх досягнень науки, у тому числі для діагностики на молекулярному рівні.

Ваші результати аналізів:

ALFA Rapid test - це експрес-тест для обстеження пацієнтів усіх вікових груп для ранньої діагностики наявності алергії, як захворювання та основних алергенів, які спровокували її розвиток, а також моніторингу хворих на алергію для оцінки ефективності та можливого коригування проведеного лікування.

ALFA Rapid test є експрес-тестом, який дає користувачеві можливість проведення дуже швидкої та надійної діагностики алергічного статусу з рідкофазними моно алергенами, мікстами (сумішами) алергенів, рекомбінантними та нативними алергенами, асортимент яких постійно поповнюється

Висока інформативність специфічної діагностики алергії, безпека та



простота виконання тесту дозволяють рекомендувати ALFA Rapid test для широкого використання, особливо при алергологічному обстеженні дітей. Шкірні проби не завжди достовірно виявляють причинний алерген, їх не можна використовувати при ураженнях шкіри, тяжкому перебігу алергії. Крім того, неможливо миттєво протестувати широкий спектр алергенів, і завжди існує небезпека розвитку у пацієнта анафілактичного шоку або посилення сенсibilізації. У маленьких дітей та у людей похилого віку проведення шкірних проб є особливо обмеженим.

ALFA Rapid test - новий високотех-

нологічний метод, що дозволяє поза лабораторними умовами (хоча, зрозуміло, можна і в лабораторії, і там, де знаходиться хворий, у нього вдома, у кабінеті лікаря при первинному амбулаторному прийомі, щоб не посилати пацієнта на непотрібні, складні та дорогі лабораторні аналізи) протягом 15-20 хвилин не тільки точно діагностувати великий спектр різноманітних груп алергенів (побутові, лікарські, грибові, епідермальні, інсектні, професійні, харчові, пилокві), а й оцінювати рівень їх тяжкості. Аналіз дозволяє виявити імунний статус пацієнта прямо на прийомі у лікаря за допомогою тестів на імуноглобулін E.

Експрес-тест призначений для якісного визначення вмісту концентрації алергенспецифічних IgE-антитіл методом ІХА в цільній та капілярній крові, у сироватці або у плазмі. В тому числі на молекулярному рівні - молекулярна алергодіагностика означає використання молекул алергенів у серологічних тестах. Молекулярна алергодіагностика дозволяє визначити сенсibilізацію до алергенів у пацієнта на молекулярному рівні. Таким чином, нативні, високо очищені та рекомбінантні алергени використовуються замість цілісних екстрактів алергенів

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО IgE

Призначення

ALFA Total IgE - це експрес-тест для безприладного якісного, дуже швидкого визначення вмісту загального імуноглобуліну Е в цілісній та капілярній крові, у сироватці або в плазмі, імунохроматографічним методом, з метою діагностики алергій, імунодефіцитних станів та інших захворювань, що супроводжуються збільшеними рівнями IgE.

Компоненти набору

Упаковка: 20 тестових модулів (тест-касет), розрахованих на 20 тестів, готових до застосування. (Кожна тест-касета упакована в індивідуальний фольгований пакет з вологопоглиначем).

Флакон х 2.0 мл анти-IgE, розрахований на 20 тестів, готовий до застосування. Кольорова індикаторна карт-

ка для оцінки результатів реакції. Матеріали, що не входять до складу набору та постачаються окремо: механічний скарифікатор, мікропіпетка для перенесення та додавання капілярної крові у касету.

Аналітичні характеристики

Для визначення концентрації загального імуноглобуліну класу Е у сироватці, плазмі або цільної крові, взятої з пальця або цільної крові, взятої з вени. Кількість визначень 20.

Діапазон вимірів: 5-1000 МО/мл, чутливість 5 МО/мл, специфічність 90,9%.

Час визначення - 20 хв. Контроль із застосуванням буфера не дає хибно-позитивних результатів. Терміни придатності до 2-х років, стабільність після відкриття протягом усього терміну

придатності. Зберігання при температурі 2-8 ° С. Маркування CE.

Загальна інформація

Показник рівня загального IgE використовується в практиці клініко-діагностичних лабораторій, як маркер atopічних захворювань (атопічної астми, дерматиту та ринокон'юнктивіту).

Атопічний (IgE-залежний) механізм може також лежати в основі гастроентероколіту, кропив'янки, інших форм васкулітів, холециститу, вульвовагініту та циститу. Частина лікарської алергії (в основному на пеніциліни та

білкові препарати) так само розвивається за IgE -залежним механізмом. Крім atopічних захворювань, титри загального IgE значно підвищуються при паразитарних інвазіях та мікозах (особливо системних).

Експрес-діагностика в педіатрії - діти, це та категорія хворих, які особливо тяжко переносять будь-які захворювання в силу ще не до кінця сформованої імунної системи. Тому експрес-діагностика тут має особливе значення для того, щоб заощадити час, не допустити прогресування захворювання та запобігти розвитку можливих ускладнень.



Схема виконання аналізу складається з нескладних етапів і займає в середньому 20 хвилин - швидко, надійно, безпечно

КРОК 1



Внести (закапати) 10 мкл сироватки (плазми) або 20 мкл цільної крові в тестовий модуль (касету) в область для нанесення зразка, позначену літерою «S».

Відразу після цього внесіть (закачайте) 3 краплі розчину анти-IgE в тестовий модуль (касету) в область для нанесення зразка, позначену буквою «S»

КРОК 2



КРОК 3



Результат аналізу візуалізується через 25-30 хв інкубації. Його слід інтерпретувати у проміжку від 25 до 30 хвилин після початку аналізу.

Можливість помилкового результату чи неправильного використання мінімізована завдяки внутрішньому контролю тестера. Використовується візуальна детекція результату за допомогою індикаторної карти.

Ключові мотиватори

Аналіз виконується без використання лабораторного обладнання, спеціалізованого медичного персоналу та спеціальних умов. Аналіз може проводитися алергологами, педіатрами, сімейними та дільничними лікарями у себе в кабінеті або на виїзді біля ліжка хворого, в медичних установах, санаторіях, військоматах, тощо.

ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ IgE

Призначення

ALFA Rapid test - це експрес-тест для безприладного якісного, дуже швидкого визначення вмісту специфічних IgE у цільній та капілярній крові, у сироватці або у плазмі, імунохроматографічним методом, для обстеження пацієнтів усіх вікових груп, для діагностики наявності алергії як захворювання та основних алергенів, що спровокували її розвиток, а також моніторингу хворих на алергію для оцінки ефективності та можливого коригування проведеного лікування.

Комплектація

Реагенти, необхідні для постановки аналізу:

Набір тестових модулів (тест-касет) № 1800010 -> кількість визначень 20.

Набір тестових модулів (тест-касет) № 184000 -> кількість визначень 80.

ALFAMOHO алергени -> 1 флакон 1,0 мл розрахований на 10 тестів.

ALFA міксти (суміші) алергенів 1 флакон 2,0 мл розрахований на 20 тестів.

ALFA рекомбінантні та нативні алергени —> 1 флакон 1,0 мл розрахований на 10 тестів. Мікропіпетка для перенесення капілярної крові в тестовий модуль №1800002.



ПИЛОК ДЕРЕВ ТА ЧАГАРНИКІВ

моно алергени, 19 видів

Кат. №	Назва алергену
18-T 001	Клен ясенелистий
18-T 002	Вільха сіра
18-T 003	Береза біла
18-T 004	Ліщина звичайна
18-T 005	Бук лісовий
18-T 007	Дуб білий
18-T 009	Маслина європейська
18-T 011	Платан кленолистий
18-T 012	Верба біла
18-T 014	Тополя
18-T 015	Ясен звичайний
18-T 023	Кіпаріс
18-T 040	Сосна
18-T 039	Пекан
18-T 036	Акація
18-T 024	Кедр
18-T 019	Мімоза
18-T 018	Евкалипт
18-T 016	Біла сосна

мікси алергени, 3 види

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
18-T x 001	Пилку дерев 1	18-T x 004	Пилку дерев 4
T 002	Вільха сіра	T 001	Клен
T 003	Береза біла		ясенелистий
T 004	Ліщина звичайна	T 003	Береза біла
18-T x 002	Пилку дерев 2	T 005	Бук лісовий
T 009	Маслина європейська	T 007	Дуб білий
T 023	Кіпаріс	T 011	Платан
			кленовий
		T 014	Тополя

ПИЛОК БУР'ЯНІВ І КВІТІВ

моно алергени, 16 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
18-W 001	Амброзія	18-W 015	Лутига
18-W 006	Полин звичайний	18-W 018	Щавель горобиний
18-W 007	Нів'яник звичайний	18-W 019	Настінниця розлога 2
18-W 008	Кульбаба лікарська	18-W 020	Кропива дводомна
18-W 009	Подорожник ланцетолістий	18-W 021	Настінниця лікарська
18-W 010	Марь біла	18-W 025	Ромашка лікарська
18-W 011	Поташник	18-W 029	Соняшник
18-W 012	Золотушник	18-W 070	Хмель

мікси алергени, 3 види

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
18-MI x 2	Мікс 2	18-W x 001	Пилку бур'янів мікс 1
W 006	Полин звичайний	W 001	Амброзія
W 009	Подорожник ребристий	W 006	Полин звичайний
W 011	Поташник-біотинільована	W 009	Подорожник ланцетолістий
W 019	Настінниця розлога 2	18-W x 002	Пилку бур'янів мікс 2
W 021	Настінниця розлога лікарська 1	W 001	Амброзія
18-MI x 1	Мікс 1	W 019	Настінниця розлога
G 002	Свинорій пальчастий	W 021	Настінниця лікарська
G 003	Грястиця збірна	18-W x 032	Пилку бур'янів мікс 32
G006	Тимофіївка лучна	W 001	Амброзія
M 006	Alternaria tenuis	W 006	Полин звичайний
T 009	Олива	W 008	Кульбаба лікарська
T 011	Платан		

ПИЛОК ЛУГОВИХ ТРАВ І ЗЛАКІВ

моно алергени, 16 видів

Кат. № Назва алергену

18-G 001	Пахуча трава звичайна
18-G 002	Свинорий пальчастий
18-G 003	Грястиця збірна
18-G 004	Вівсяниця лучна
18-G 005	Пажитниця багаторічна
18-G 006	Тимофіївка лучна
18-G 007	Очерет звичайний
18-G 008	Тонконіг лучний
18-G 010	Сорго
18-G 011	Стоколос Бенекена
18-G 012	Жито посівне
18-G 014	Овес посівний
18-G 015	Пшениця м'яка
18-G 017	Гречка помітна
18-G 020	Кукурудза звичайна
18-G 021	Пирій повзучий

ПИЛОК ЛУГОВИХ ТРАВ І ЗЛАКІВ

мікси алергени, 5 видів


Кат. № Назва алергену

18-G x 001	Ранньоквітучі лугові трави
G 003	Грястиця збірна
G 004	Вівсяниця лучна
G 005	Пажитниця багаторічна
G 006	Тимофіївка лучна
G 008	Тонконіг лучний
18-G x 002	Пізнюквітучі лугові трави
G 001	Пахуча трава звичайна
G 005	Пажитниця багаторічна
G 007	Очерет звичайний
G 012	Жито посівне
18-G x 006	Лугові трави мікс 6
G 001	Пахуча трава звичайна
G 002	Свинорий пальчастий
G 005	Пажитниця багаторічна
G 006	Тимофіївка лучна
G 010	Сорго
18-G x 005	Лугові трави мікс 5
G 001	Пахуча трава звичайна
G 002	Свинорий пальчастий
G 005	Пажитниця багаторічна
G 006	Тимофіївка лучна
G 010	Сорго
18-G x 004	Злаків мікс 4
G 012	Жито посівне
G 014	Овес посівний
G 015	Пшениця м'яка
G 018	Ячмінь
G 020	Кукурудза звичайна

КЛІЩОВІ АЛЕРГЕНИ


моно алергени, 6 видів

Кат. №	Назва алергену
18-D 001	Dermatophagoides pteronyssinus <i>кліщ домашнього пилу</i>
18-D 002	Dermatophagoides farinae <i>кліщ домашнього пилу</i>
18-D 003	Euroglyphus maynei <i>кліщ домашнього пилу</i>
18-D 004	Dermatophagoides microceras, 10 Det. <i>кліщ домашнього пилу</i>
18-D 005	Blomia tropicalis
18-D 070	Acarus siro

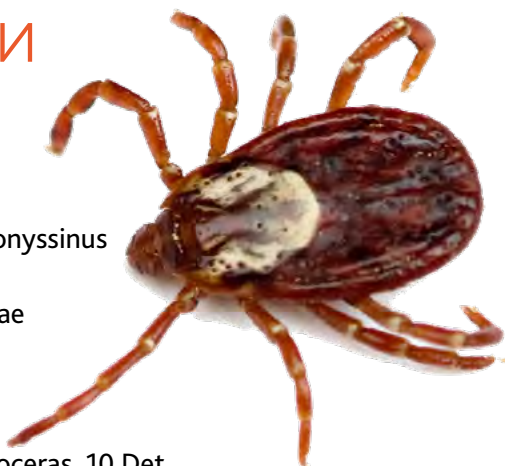

мікси алергени, 1 вид

Кат. №	Назва алергену
18-D x 001	Кліщів 1
D 001	Dermatophagoides pteronyssinus
D 002	Dermatophagoides farinae
D 003	Euroglyphus maynei
D 004	Dermatophagoides microceras

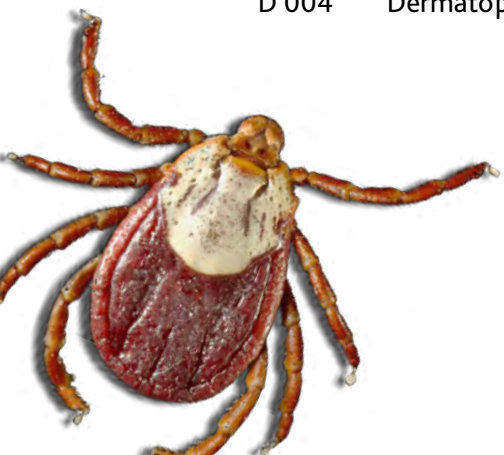

моно алергени, 4 види

Кат. №	Назва алергену
18-B 002	Бавовна (оброблена)
18-B 020	Овеча шерсть (необроблена)
18-B 021	Овеча шерсть (оброблена)
18-B 022	Шовк (Bombyx mori)

ЕПІДЕРМАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 19 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
18-E 001	Кіт	18-E 097	Папуга (послід)
18-E 003	Кінь (епідерміс)	18-E 100	Качка (послід)
18-E 004	Корова (епідерміс)	18-E 101	Бічачий сироватковий альбумін (Bos d6)
18-E 005	Собака	18-E 084	Золотистий хом'як
18-E 006	Морська свинка (шерсть)	18-E 071	Миша (епідерміс)
18-E 010	Папуга (пір'я)	18-E 020	Курка (послід)
18-E 081	Вівця	18-E 011	Голуб (пір'я)
18-E 082	Кролик (шерсть)	18-E 007	Голуб (послід)
18-E 085	Курка (пір'я)	18-E 002	Собака (шерсть)
18-E 088	Миша (епідерміс + білок)		

мікси алергени, 3 види

Кат. №	Назва алергену
18-E x 001	Епітелію тварини1
E 001	Кіт
E 005	Собака
18-E x 004	Постільне перо
E 070	Гусак (пір'я)
E 085	Курка (пір'я)
E 086	Качка (пір'я)
18-E x 011	Клітчасті декоративні птиці II
E 078	Хвилястий папуга (пір'я)
E 010	Папуга (пір'я)
E 009	Канарка (пір'я)
E 050	Зяблік (пір'я)




ГРИБКОВІ

моно алергени, 11 видів

Кат. № Назва алергену


18-M 001	Penicillium notatum
18-M 002	Cladosporium herbarum
18-M 003	Aspergillus fumigatus
18-M 004	Mucor racemosus
18-M 005	Candida albican
18-M 006	Alternaria alternata
18-M 008	Helminthosporium halodes
18-M 009	Fusarium moniliforme
18-M 011	Rhizopus nigricans
18-M 033	Aspergillus niger
18-M 046	Saccharomyces ellipsoideus

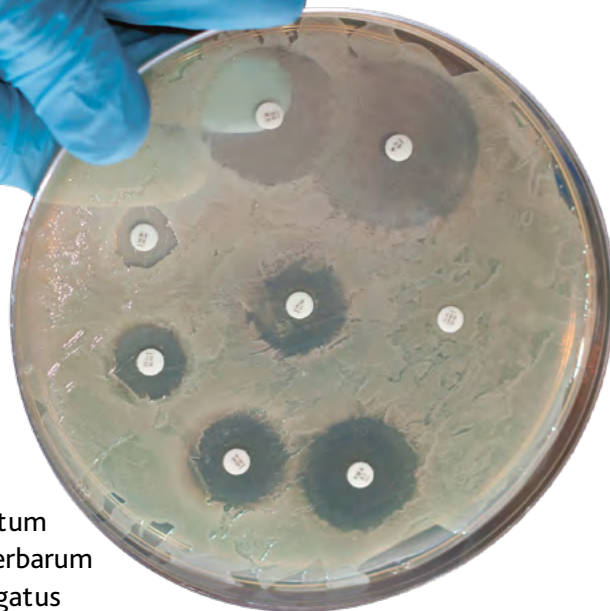

мікси алергени, 4 види

Кат. № Назва алергену

18-M x 001	Плісневі грибки микс 1
M 002	Cladosporium herbarum
M 003	Aspergillus fumigatus
M 006	Alternaria alternata
18-M x 012	Плісневі грибки микс 12
M 001	Penicillium notatum
M 002	Cladosporium herbarum
M 003	Aspergillus fumigatus
M 005	Candida albican
M 006	Alternaria alternata

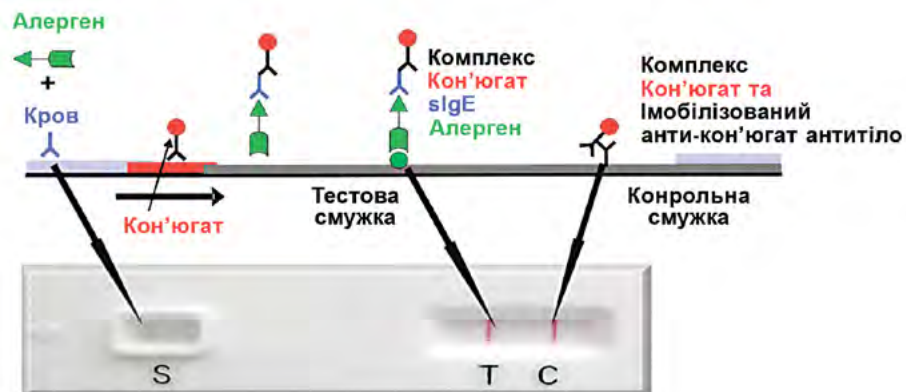

ІНСЕКТНІ ТА ОТРУТИ КОМАХ

моно алергени, 8 видів

Кат. №	Назва алергену
18-I 001	Отрута медоносної бджоли
18-I 003	Осина отрута
18-I 006	Ріжкий тарган
18-I 007	Отрута шершня звичайного
18-I 071	Комар звичайний
18-I 005	Отрута шершня жовтого
18-I 014	Американський тарган
18-I 070	Вогненна мураха

ДОМАШНІЙ ПИЛ

мікси алергени, 2 види

Кат. №	Назва алергену
18-H x 002	Домашній пил мікс 2
D 001	Dermatophagoides pteronyssinus
D 002	Dermatophagoides farinae
E 001	Кішка (епідерміс)
E 005	Собака (епідерміс)
18-H 002	Домашній пил мікс T/S (Hollister Stier)
D 001	Dermatophagoides pteronyssinus
D 002	Dermatophagoides farinae
E 001	Кішка (епідерміс)
E 005	Собака (епідерміс)
M 002	Cladosporium herbarum
M 003	Aspergillus fumigatus

ПРОФЕСІЙНІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 1 вид

Кат. №	Назва алергену
18-K 082	Латекс

ЛІКАРСЬКІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 18 видів

Кат. №	Назва алергену
18-C 001	Пеніцилін V
18-C 002	Пеніцилін G
18-C 050	Ампіцилін
18-C 056	Амоксицилін
18-C 068	Артікаїн
18-C 082	Лідокаїн
18-C 083	Прокаїн
18-C 200	Клавуланова кислота
18-C 091	Діпірон/Метамізол
18-C 079	Діклофенак
18-C 078	Ібупрофен
18-C 061	Еритроміцин
18-C 060	Гентаміцин
18-C 059	Тетрациклін
18-C 058	Сульфаметоксазол
18-C 057	Триметоприм
18-C 055	Цефалоспорин
18-C 051	Ацетилсаліцилова кислота (ASS)

мікси алергени, 1 вид

Кат. №	Назва алергену
18-C x 001	Наркотики
C 001	Пеніцилін G
C 002	Пеніцилін V
C 050	Ампіцилін
C 055	Цефалоспорин
C 056	Амоксицилін



ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 117 видів



<i>Кат. №</i>	<i>Назва алергену</i>	<i>Кат. №</i>	<i>Назва алергену</i>
18-F 001	Яєчний білок	18-F 052	Шоколад
18-F 002	Молоко корови	18-F 053	Персика
18-F 003	Тріска	18-F 061	Цвітна капуста (сира)
18-F 004	Пшеничне борошно	18-F 073	Вишня
18-F 005	Житнє борошно	18-F 076	Альфа-лактальбумін
18-F 006	Ячмінне борошно	18-F 077	Бета-лактоглобулін
18-F 007	Вівсяне борошно	18-F 078	Казеїн
18-F 008	Кукурудзяне борошно	18-F 079	Глютена
18-F 009	Рис	18-F 083	Куряче м'ясо
18-F 011	Гречана крупа	18-F 084	Ківі
18-F 012	Горох	18-F 085	Селери
18-F 013	Арахіс	18-F 087	Диня
18-F 014	Соеві боби	18-F 088	Баранина/ягня
18-F 016	Волоський горіх	18-F 091	Манго
18-F 017	Лісовий горіх	18-F 130	Індички
18-F 023	Краба	18-F 134	Броколі
18-F 024	Креветки	18-F 136	Буряк
18-F 025	Томат	18-F 151	Цукіні
18-F 026	Свинини	18-F 156	Малина
18-F 027	Яловичини	18-F 167	Кролика
18-F 029	Банан	18-F 203	Гренадін
18-F 030	Груша	18-F 219	Козяче молоко
18-F 031	Морква	18-F 248	Фінікі
18-F 033	Апельсин	18-F 252	Незбиране яйце
18-F 034	Мандарин	18-F 301	Виноград (синій)
18-F 035	Картоплі	18-F 367	Перепелине яйце
18-F 039	Капуста	18-F 400	Слива (сушена)
18-F 040	Тунець	18-F 092	Грейпфрут
18-F 044	Полуниця	18-F 089	Гірчиця
18-F 045	Дріжджів	18-F 082	Сир з цвіллю
18-F 049	Яблуко	18-F 081	Сир Чеддер
18-F 050	Виноград	18-F 080	Омара

<i>Кат. №</i>	<i>Назва алергену</i>	<i>Кат. №</i>	<i>Назва алергену</i>
18-F 075	Яєчний жовток	18-F 100	Латук
18-F 072	Ананас	18-F 101	Раковині молюска
18-F 068	Овомукоїд	18-F 256	Кокосове молоко
18-F 067	Овальбуміну	18-F 286	Хурма
18-F 065	Сочевиця	18-F 103	Горіх пекан
18-F 057	Качине м'ясо	18-F 353	Бас
18-F 056	Червоної риби	18-F 354	Європейського хеку
18-F 122	Олива зелена	18-F 048	Цибуля
18-F 133	Огірок	18-F 047	Часнику
18-F 144	Фісташка	18-F 046	Паприка
18-F 148	Слизова	18-F 043	Saccharomyces carlsbergensis
18-F 149	Папайя	18-F 041	Лосось
18-F 158	Кешью	18-F 038	Шпинат
18-F 159	Турецький горох	18-F 037	Мідія
18-F 160	Сардіна	18-F 036	Кокос
18-F 161	Кальмару	18-F 032	Лимон
18-F 165	Телятини	18-F 022	Форелі
18-F 174	Скумбрії	18-F 021	Оселедця
18-F 175	Ожина	18-F 020	Мигдаль
18-F 177	Устриці	18-F 018	Бразильський горіх
18-F 178	Пікші	18-F 015	Біла квасоля
18-F 179	Креветки	18-F 010	Кунжут (розтерте зерно)
18-F 191	Гарбуз		
18-F 095	Кава		
18-F 206	Квасоля червона		
18-F 210	Пшениця (колоте зерно)		
18-F 211	Маракуя		
18-F 093	Сир Рокфор		
18-F 223	Альфа-амілаза		
18-F 237	Айви		
18-F 242	Сом		



ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ

мікси алергени, 22 види

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
18-F x 001	Харчових продуктів 1	F 004	Пшеничне борошно
	F 049 Яблуко	F 013	Арахіс
	F 073 Вишня	F 014	Соєві боби
	F 084 Ківі	F 017	Лісовий горіх
18-F x 002	Харчових продуктів 2	F 085	Селери
	F 031 Морква	18-F x 149	Харчових продуктів 149
	F 085 Селери	F 002	Молоко корови
18-F x 003	Горіхи 1	F 003	Тріска
	F 016 Волоський горіх	F 024	Креветки
	F 017 Лісовий горіх		
18-F x 005	Харчових продуктів 5	18-F x 027	Рибних продуктів 27
	F 001 Яєчний білок	F 003	Тріска
	F 002 Молоко корови	F 040	Тунець
	F 003 Тріска	F 041	Лосось
	F 004 Пшеничне борошно	18-F x 026	Мука 26
	F 013 Арахіс	F 004	Пшеничне борошно
	F 014 Соєві боби	F 007	Вівсяне борошно
	F 017 Лісовий горіх	F 008	Кукурудзяне борошно
18-F x 008	М'ясних продуктів 8	F 009	Рис
	F 026 Свинини	F 011	Гречана крупа
	F 027 Яловичини		
	F 088 Баранина/ягня	18-F x 145	Компоненти молока
18-F x 019	Фруктів 19	F 076	Альфа-лактальбумін
	F 032 Лимон	F 077	Бета-лактоглобулін
	F 033 Апельсин	F 078	Казеїн
	F 034 Мандарин		
	F 092 Грейпфрут		
18-F x 148	Харчових продуктів 148		

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
18-F x 026	Мука 26	18-F x 165	Харчових продуктів 165
	F 004 Пшеничне борошно	F 023	Краба
	F 007 Вівсяне борошно	F 024	Креветки
	F 008 Кукурудзяне борошно	F 037	Мідія
	F 009 Рис	F 071	Лангуст
		F 101	Раковині моллюска
18-F x 019	Фруктів 19	18-F x 152	Горіхи 152
	F 032 Лимон	F 016	Волоський горіх
	F 033 Апельсин	F 017	Фундук
	F 034 Мандарин	F 020	Мигдаль
	F 092 Грейпфрут	18-F x 150	Рибних продуктів 150
18-F x 015	Горіхи 15	F 049	Яблуко
	F 013 Арахіс	F 053	Персик
	F 017 Лісовий горіх	18-F x 149	Харчових продуктів 149
	F 018 Бразильський горіх	F 004	Пшеничне борошно
	F 020 Мигдаль	F 013	Арахіс
	F 036 Кокос	F 014	Соя
18-F x 010	Фруктів 10	F 017	Фундук
	F 030 Груша	F 085	Селера
	F 032 Лимон	18-F x 148	Харчових продуктів 148
	F 044 Полуниця	F 002	Коров'яче молоко (сире)
	F 072 Ананас	F 003	Тріска
18-F x 166	Харчових продуктів 166	F 024	Креветки
	F 003 Тріска	F 252	Яйце (білок та жовток)
	F 040 Тунець		
	F 041 Лосось	18-F x 034	Горіхи 34
	F 162 Морський язик звичайний	F 013	Арахіс
	F 220 Анчоус	F 016	Волоський горіх
	F 354 Європейського хеку	F 017	Фундук
		F 020	Мигдаль
		F 036	Кокосовий горіх

АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ

рекомбінантні та нативні, 48 видів

Кат. №	Назва алергену	Джерело алергену
18-ND 11	D. pteronyssinus	Der p1
18-ND 12	D. pteronyssinus	Der p2
18-ND 21	D. farinae	Der f1
18-ND 22	D. farinae	Der f2
18-RE 11	Кішка	Fel d1
18-NF 24	Тропоміозин креветки	Pen a 1
18-NF 131	Арахіс	Ara h1
18-NF 132	Арахіс	Ara h2
18-NF 133	Арахіс	Ara h3
18-NF 136	Арахіс	Ara h6
18-NF 253	Пероксидаза хрому	CCD
18-RF 171	Лісний горіх	Cor a1
18-RF 178	Лісний горіх	Cor a8
18-RF 180	Короп	Cyp c1
18-RF 311	Морква	Dau c1
18-RF 441	Полуниця	Fra a1
18-RF 443	Полуниця	Fra a3
18-RF 491	Яблуко	Mal d1
18-RF 493	Яблуко	Mal d3
18-RF 531	Персик	Pru p1
18-RF 533	Персик	Pru p3
18-RF 534	Персик	Pru p4
18-RT 901	Олива	Ole e1
18-RT 301	Береза	Bet v 1a
18-RT 302	Береза	Bet v2
18-RT 304	Береза	Bet v4
18-RG 601	Тимофіївка лучна	Phl p1
18-RG 605	Тимофіївка лучна	Phl p5
18-RG 607	Тимофіївка лучна	Phl p7
18-RG 612	Тимофіївка лучна	Phl p12
18-NW 101	Амброзія	Amb a 1
18-RW 601	Полин звичайний	Ole e1

Кат. №	Назва алергену	Джерело алергену
18-RK 825	Латекс	Hev b5
18-RK 826	Латекс	Hev b6
18-RK 827	Латекс	Hev b7
18-RK 828	Латекс	Hev b8
18-RI 101	Отрута бджоли	Api m1
18-RI 102	Отрута бджоли	Api m2
18-RI 305	Отрута оси	Ves v5
18-RT 401	Ліщина	Cor a1
18-NF 179	Лісовий горіх	Cor a9
18-RE 11	Кішка	Fel d1
18-P 005	Anisakis	
18-RM 601	Alternaria tenuis	Alt a1
18-RF 419	Пшениця	Tri a19
18-RF 1714	Лісний горіх	Cor a14
18-RF 138	Арахіс	Ara h8
18-RF 139	Арахіс	Ara h9

мікси алергени, 6 видів

Кат. №	Назва алергену	Джерело алергену
18-RG 620	Тимофіївка лучна основний алерген	Phl p 1 — Phl p 5
18-RG 621	Тимофіївка лучна другорядний алерген	Phl p 7 — Phl p 12
18-MS 01	Мульти скрінінг	d1, d5, e1, e5, g2, g5, m2, m3, m6
18-PIS 001	Інгаляційний багаторічний	d1, d2, i6, m3
18-ST x 033	Мульти скрінінг 33	g6, m6, t9, w21
18-SIS 001	Інгаляційний сезонний скрінінг	g6, t3, w6, m6





ТОВ АЛЬБАМЕД
ЄДРПОУ 41424340
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27
e-mail:salesalbamed@gmail.com
e-mail: albamed.ua@gmail.com
(063)966-52-57
(067)772-57-78

